



THUASNE

Compressioncare 2020



VENOFLEX · LYMPHATREX® · MOBIDERM® · CICATREX®

Waschen und Pflegen

Pflegehinweise für LYMPHATREX®, CICATREX® und VENOFLEX: Kompressionskleidung sollte möglichst täglich gewaschen werden. Nicht nur Salbenreste und Fett sammeln sich im Gewebe, sondern auch Hautschuppen, Schweiß und Staub. Regelmäßige Wäsche schützt Sie vor Infektionen und Ihr Kleidungsstück vor Verschleiß. Damit Sie die Kompressionstherapie während des Waschens und Trocknens nicht unterbrechen müssen, benötigen Sie eine Wechselversorgung.

- Bitte waschen Sie das Kleidungsstück auf links gezogen und nur mit einem Feinwaschmittel.
- Schongang bei 40° C. Auf keinen Fall darf Weichspüler verwendet werden!
- Bitte das Kleidungsstück nicht auf einer Heizung oder einer anderen direkten Wärmequelle trocknen! Dadurch werden die Kompressionsfäden zerstört.
- Ist in eine Narbenkompression Silon-TEX® eingearbeitet, bitte aus hygienischen Gründen das Kleidungsstück nach dem Waschen besonders gut trocknen und möglichst locker und belüftet aufbewahren.

Pflegehinweise MOBIDERM® autofit: Vor dem Waschen die Klettverschlüsse schließen. Beim Waschen gibt es zwei Möglichkeiten:

- Handwäsche: Das Produkt in kaltem Seifenwasser einweichen, mit einem sauberen Schwamm abreiben und das Wasser ausdrücken.
- Maschinenwäsche: Im Wollwaschgang kalt in einem Wäschenetz waschen. Wasser mit der Hand ausdrücken.
- In beiden Fällen bei Raumtemperatur fern von direkter Hitzeeinwirkung trocknen lassen.
- Werden die Produkte nicht getragen, so sind sie flach liegend mit geschlossenen Klettverschlüssen zu lagern. Falls sie zusammengelegt werden müssen, sollten die Klettverschlüsse nach außen zeigen

Die detaillierten Hinweise zu Waschen und Pflege finden sich als Symbole auf den Etiketten und natürlich auch in der Gebrauchsanweisung.



SelfCare - Spezial-Pflegeprodukte

Zur Pflege Ihrer Kompressionstextilien empfehlen wir unsere speziellen Waschmittelkonzentrate:

Compression Clean

Für medizinische Kompressionsstrümpfe und Bandagen.

Compression Fresh

Zum Waschen von mikrobiell belasteter Wäsche, auch für medizinische Kompressionstextilien geeignet

Zur Pflege der Haut empfehlen wir **Compression Care**

Hydratisierende Hautpflegelotion, ideal zur Pflege von durch Kompression beanspruchter Haut.

UV-/Sonnenschutz

Unsere Haut benötigt bei erhöhter UV-Belastung durch Sonnenlicht Schutz. Dies gilt ganz besonders für das Narbengewebe. Was ist daher beim Tragen von Kompressionskleidung zu beachten?

Es gibt keinen UV-Test für Kompressionsmaterialien, UV Standard 801 Test ist im Wesentlichen auf Beschattungsmaterialien ausgelegt. **CICATREX® erreicht im Test die gleichen Werte wie andere Kompressionsgestricke.** Jedoch sind die Werte des UV Standard 801 Tests Werte für ungedehnte, ungetragene Materialien. Aus unserer Sicht ist daher die Angabe auf Kompressionstextilien irreführend.

Wir empfehlen daher auch unter der Kompressionskleidung einen geeigneten Sonnenschutz in Form von Cremes o. ä. zu verwenden.

ARION Anziehhilfen für Kompressionskleidung

Kompressionskleidung richtig anzuziehen benötigt etwas Körperkraft und Beweglichkeit. Was aber tun, wenn beides eingeschränkt ist? ARION hat dafür hochfunktionelle und erstattungsfähige Anziehhilfen entwickelt. Mit ihnen lassen sich die Kompressionsprodukte einfacher und schneller anlegen. Die Anziehhilfen von ARION sind auch direkt bei THUASNE erhältlich.

Produktvorteile

- Verminderung der körperlichen Belastung für Pfleger und Patienten
- Verstärkte Selbstständigkeit und Therapietreue
- Einfache Anwendung
- Zeit- und Kostenersparnis
- Reibungsverringering durch sehr glattes Material mit Spezialbeschichtung
- Elastische Materialien behalten länger ihren therapeutischen Druck
- Handwaschbar mit Feinwaschmittel bei 30°C



Arion Easy-Slide Anziehhilfe für medizinische Kompressionsstrümpfe und -strumpfhosen mit offener Fußspitze



Arion Magnide® Anziehhilfe für Kompressionsstrümpfe mit geschlossener Fußspitze



Arion Easy-Slide Arm Anziehhilfe für Kompressionsarmstrümpfe



TSS-Handschuhe Sorgen für optimalen Grip beim Anziehen, verhindern Beschädigungen des Strumpfes durch Fingernägel oder Schmuck



Arion Magnide® Kids Anziehhilfe für Kompressionsstrümpfe mit geschlossener Fußspitze für Kinder



Arion Easy-Slide Kids Spielend leichtes Anlegen der Kompressionskleidung von Kindern

Service

Das ist unser Anliegen: Den Patienten sicher mit einer passenden, tragbaren und medizinisch hochwirksamen Kompression zu versorgen.

Unser Ziel ist, dass Sie sich sicher fühlen, in der Situation des Messens, bei der Abgabe unserer Produkte, und mit unserer Unterstützung, falls es zu Beschädigungen oder sonstigen Problemen kommt.

Gern berät Sie unser engagierter Innendienst telefonisch bei allen Anliegen zur Konzeption der Versorgung, der Materialauswahl und beim Maßnehmen.



Kundenservice-Hotline

Montag bis Donnerstag von 08.00 bis 17.00 Uhr

Freitag von 08.00 bis 16.00 Uhr

Kundenservice Allgemein: +49 5139 988-0 oder 0800 8482763

Kundenservice Serienprodukte: +49 5139 988-205



Kundenservice Maßprodukte

Tel.: +49 6451 7212-180

Fax: +49 6451 7212-980 oder

E-mail: massbestellung@thuasne.de



Online-Bestellung für Maßprodukte
www.thuasne.de/ctcad/start1.jsp



**THUASNE M2M –
Der mobile Partner für die
passgenaue Versorgung**

Impressum

THUASNE DEUTSCHLAND GmbH
Im Steinkamp 12, 30938 Burgwedel

Tel. +49 5139 988-0
Fax +49 5139 988-177

E-Mail: info@thuasne.de
Internet: www.thuasne.de

Geschäftsführer: Sebastian Mania, Dr. Thomas Hövetborn,
Elizabeth Ducottet, Delphine Hanton

Handelsregister HRB 205507 Amtsgericht Hannover
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer
gemäß § 27a Umsatzsteuergesetz: DE 252968335
Steuer-Nummer: 02624620419

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, aktuell abrufbar
im Internet unter www.thuasne.de oder telefonisch beim Kundenservice

THUASNE DEUTSCHLAND GmbH

Im Steinkamp 12 · D-30938 Burgwedel
Tel.: +49 5139 988-0 · Fax: +49 5139 988-177
info@thuasne.de · www.thuasne.de

Hauptstraße 16 · 35099 Burgwald
Tel.: +49 6451 7212-180 · Fax: +49 6451 7212-980

Kundenservice-Hotline: Montag bis Donnerstag
von 8.00 bis 17.00 Uhr, Freitag von 8.00 bis 16.00 Uhr

Kundenservice Allgemein: Tel.: 0800 8482763

Kundenservice Serienprodukte:
Tel.: +49 5139 988-0 · Fax: +49 5139 988-177

Kundenservice Maßprodukte:
Tel.: +49 6451 7212-180 · Fax: +49 6451 7212-980



TM1343202BDD20_08190325